

schülke →



Dezinfekčné vreckovky s nízkym obsahom alkoholu určené k dezinfekcii malých plôch a povrchov. Vysoká kompatibilita s materiálmi.

Rýchla dezinfekcia
citlivých povrchov

mikrozid® universal wipes

Naše Plus

- Výborná materiálová kompatibilita
- Rýchla účinnosť (norovírus do 30 sekúnd)
- Účinný podľa EN 16615 za 1 minútu
- Dermatologicky testované
- Vysoká kvalita vreckoviek o rozmeroch 20x20 cm
- Výborné čistiace účinky

Oblasti použitia

Rýchla dezinfekcia malých plôch a povrchov na báze alkoholu použiteľná na všetky druhy utierateľných materiálov so zvýšením rizikom infekcie tam, kde je vyžadovaná rýchla účinnosť a dobrá kompatibilita s materiálmi, napr.:

- Povrchy v okolí pacientov
- Liečebné zariadenia
- Operačné stoly a príslušenstvo
- Inkubátory
- Povrchy zdravotníckych prostriedkov
- Displeje, dotykové obrazovky a ovládacie panely
- Nábytok a koženkové čalúnenie
- Citlivé povrchy

Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, virucídny (Adeno, Noro, Rota, Polyoma SV 40, obalené vírusy - HBV, HCV, HIV).
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Pred použitím dezinfekčných vreckoviek odstráňte z povrchu hrubé nečistoty. Navlhčenou vreckovku následne utrite povrch určený k dezinfekcii. Uistite sa, že balenie je po vytiahnutí potrebného počtu vreckoviek opäť zatvorené.

Výrobca garantuje účinnosť produktu mesiac po otvorení balenia.



CE 0297



mikrozid® universal wipes

Zloženie

Balenie obsahuje 100 vreckoviek napustených roztokom. 100 g dezinfekčného roztoku obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 17,4 g Propan-2-ol
- 12,6 g Ethanol

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	26 °C / Metóda: DIN 51755 Part 1 / aktívneho roztoku
Dynamická viskozita	Údaje sú nedostupné
Farba	bezfarebný
Forma	Vodný, alkohol obsahujúci roztok na ovčie rúno stieračkách
Hustota	cca. 0,95 g/cm ³ / aktívneho roztoku
pH	3 - 3,6 / 100 % / aktívneho roztoku



Zvláštna upozornenia

Používajte dezinfekčný prípravok bezpečne. Pred použitím si prosím prečítajte etiketu. Výrobok je kompatibilný s kovmi a syntetickými materiálmi. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Elektrické prístroje použité po dokonalom zaschnutí a odparení dezinfekčného roztoku. Zákaz fajčenia. Skladujte v uzatvorených obaloch, mimo zdrojov sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného žiarenia. Teplota skladovania: +15 až +25 °C. Veľkosť dezinfikovanej plochy je ovplyvnená teplotou a povrchom dezinfikovaného materiálu. Po každom vytiahnutí vreckovky je nutné balenie dôkladne zavrieť. Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
mikrozid universal wipes premium 100ks	6/Kartón	70000038

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

- Zdravotnícky prostriedok triedy IIa
- Biocídny prípravok - Reg.č.bio/1515/D/17/CCHLP



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com