



Nízkoalkoholová, rýchla dezinfekcia neinvazívnych zdravotníckych pomôcok a povrchov.

mikrozid® universal liquid

Naše Plus

- Vhodný na dezinfekciu citlivých povrchov komunikačných zariadení
- Dermatologicky testovaný
- Na okamžité použitie

Oblasti použitia

Výrobok je vhodný na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a ostatných povrchov. Náš univerzálny a rýchly dezinfekčný prostriedok je tiež vhodný na dezinfekciu citlivých komunikačných zariadení. Inteligentné telefóny a tablety patria medzi najbežnejšie dotykové kontaktné plochy. S prípravkom **mikrozid® universal liquid** môžu byť bezpečne ošetrené bez poškodenia materiálov.

Účinnosť

Baktericídny, obmedzene virucídny, levurocídny, tuberkulocídny
Pre viac informácií o biocídnej účinnosti produktu kontaktujte zamestnanca Schulke SK

Návod na použitie

Naneste neriedený prípravok na povrch, rozotrite a nechajte pôsobiť. Zaisťte úplné zvlhčenie a udržiavajte povrch vlhký po celú dobu expozície. Zaisťte, aby všetky viditeľné nečistoty boli odstránené pred dezinfekciou. Postriekajte povrch zo vzdialenosti cca. 30 cm (približne 40 ml/m²) a nechajte uschnúť. Pre účinnosť na Adenovírus a Mycobacterium tuberculosis, udržiavajte povrch mokry po celú dobu expozície. Iba pre profesionálne použitie. Akékoľvek závažné incidenty súvisiace s produktom majú byť oznámené výrobcovi a príslušnému orgánu. Prípravok nie je určený pre záverečnú dezinfekciu semikritických a kritických zdravotníckych

pomôcok! Prípravok môže byť použitý bez rukavíc v závislosti od epidemiologickej situácie a bezpečnosti práce

CE 0297



mikrozid® universal liquid

Zloženie

100 g roztoku obsahuje nasledujúce aktívne látky: 17,4 g

Propán-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w)

Označenie podľa nariadenia o zhode (EC) No. 648/2004: < 5% aniónové povrchovo aktívne látky

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	26 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Dynamická viskozita	neurčené
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 0,95 g/cm ³
pH	3 - 3,6 / 100 %

Zvláštne upozornenia

Používajte dezinfekčné prostriedky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informáciu o produkte. Výrobok má veľmi dobrú materiálovú kompatibilitu s kovmi a plastami. Chráňte pred teplom a zdrojmi vzniku požiaru. Ďalšie informácie sú k dispozícii na vyžiadanie. Dobu použiteľnosti otvoreného balenia nájdete na obale. Prípravok môže byť použitý bez rukavíc v závislosti od epidemiologickej situácie a bezpečnosti práce.

Doba expirácie: 36 mesiacov

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty hospodárnym spôsobom prostredníctvom inovatívnych a bezpečných postupov šetrných k životnému prostrediu, a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa.

Biocíd



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com