

schülke -+



Tekutý dezinfekčný prípravok na báze kombinovaného účinku alkoholov a KAS vhodný k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov.

**Rýchly
účinnok**

desprej[®] new

Naše Plus

- Okamžite k použitiu
- Zaručuje rýchly dezinfekčný efekt
- Vhodný k dezinfekcii zle dostupných miest
- Dobrá materiálová znášateľnosť
- Kompatibilný s vreckovkami wettask a schülke wipes

Oblasti použitia

Desprej new je vhodný k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov v zdravotníctve, kozmetických, pedikérskych a tatoo salónoch, fitness a wellness centrách (stoly, vozíky, kľučky, dvere, pomôcky atď.). Obzvlášť vhodný pre oblasti so zvýšeným infekčným rizikom. Prípravok je vhodný všade tam, kde je potrebná rýchla a účinná dezinfekcia ako napr.:

- Povrchy v blízkosti pacientov
- Kontaktné plochy
- Ordinácie
- Operačné stoly a okolité povrchy
- Jedáľenské stoly a pracovné plochy

Účinnosť

Baktericídny, kompletne virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny.

Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Desprej new sa neriedi a aplikuje sa koncentrovaný pomocou postreku, prípadne náteru. Dbajte na rovnomerné naniesenie prípravku (rozotrite utierkou) a nechajte ho pôsobiť po dobu expozície, prebytočné množstvo tekutiny utrite po uplynutí doby expozície jednorazovou utierkou. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).



Zloženie

100 g prípravku **desprej new** obsahuje nasledujúce účinné látky:

- 45 g Ethanol
- 30 g Isopropanol
- 0,025 g Didecyldimethylammonium chloride

Zvláštne upozornenia

Určené len pre profesionálny trh. Nemiešajte s inými produktami. Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Nevdychujte aerosol. Povrchy, ktoré majú prísť do kontaktu s potravinami je nutné po dezinfekcii umyť čistou vodou. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Zákaz fajčenia. Skladovať v uzatvorených obaloch mimo zdroja sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a priameho slnečného žiarenia. Teplota skladovania -10 °C až +25 °C. Prípravok nie je vhodný na povrchy, ktoré narušuje alkohol (plexisklo, akryláty, lakované povrchy).

Doba expirácie: 36 mesiacov.

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Biocídny prípravok



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz