

schülke -†



Tekutý alkoholový prípravok určený k rýchlej dezinfekcii a čisteniu povrchov zdravotníckych prostriedkov.

Rýchly
účinnok

desam[®] spray

Naše Plus

- Okamžite k použitiu
- Zaručuje rýchly dezinfekčný efekt
- Vhodný k dezinfekcii zle dostupných miest
- Dobrá materiálová znášanlivosť
- Kompatibilný s vreckovkami wettask a schülke wipes

Oblasti použitia

Desam spray je vhodný k rýchlej dezinfekcii zdravotníckych prostriedkov. Obzvlášť vhodný pre oblasti so zvýšeným infekčným rizikom. Prípravok je vhodný všade tam, kde je potrebná rýchla a účinná dezinfekcia.

Účinnosť

Baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny, levurocídny.

Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Desam spray sa neriedi a aplikuje sa koncentrovaný pomocou postreku, prípadne náteru. Dbajte na rovnomerné naniesenie prípravku (rozotrite utierkou) a nechajte ho pôsobiť po dobu expozície, prebytočné množstvo tekutiny utrite po uplynutí doby expozície jednorazovou utierkou. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, makrolon, guma, mäkké PVC, lakované povrchy). Nie je určený k dezinfekcii invazívnych zdravotníckych prostriedkov.

CE 1023



Zloženie

100 g prípravku **desam spray** obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 45 g Ethanol
- 30 g Isopropanol
- 0,025 g Didecyldimethylammonium chloride

Zvláštne upozornenia

Určené len pre profesionálny trh. Nemiešajte s inými produktami. Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Nevdychujte aerosol. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Zákaz fajčenia. Skladovať v uzatvorených obaloch mimo zdroja sálavého tepla, ohňa a priameho slnečného žiarenia. Teplota skladovania -10 °C až +25 °C.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
desam spray PL 1 l	12/Kartón	70002790
desam spray CZ/SK/PL 5 l	1/Kanister	70002792



Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz