



Konzentrát pre nácvik techniky správnej dezinfekcie rúk

schülke optics concentrate

Naše Plus

- Fluorescenčný koncentrát na kontrolu správne vykonanej dezinfekcie rúk
- Pod UV svetlom vizualizuje miesta, na ktoré bola dezinfekcia nedostatočne aplikovaná
- Individuálne a skupinové tréningy, výučba v tréningových centrách, na klinikách aj v praxi a pri testovaní
- Tréningové štítky pre kompatibilné produkty sú súčasťou balenia Používajte v kombinácii s dezinfekčným prípravkom na ruky na báze alkoholu (napr. desmanol pure)

Návod na použitie

1. Pripravte tréningový roztok: Pred zahájením tréningu nalejte obsah 10ml fľaštičky s koncentrátom **schülke optics** do plnej 500ml fľaštičky schülke dezinfekčného prostriedku na ruky (napr. desmanol® pure). Obsah krátko pretrepte. Umiestnite na 500 ml fľaštičku cvičnú nálepku schülke optiky, aby nedošlo k zámene s bežným obsahom dezinfekcie rúk.
2. Začnite nácvik dezinfekcie rúk: Votrite tréningový roztok do rúk na základe hygienických alebo chirurgických krokov dezinfekcie rúk.
3. Zistite výsledok pod UVs vetlom: Svetlejšie plochy znamenajú lepšie zmáčanie a tým aj účinnejšiu dezinfekciu. Tmavé oblasti ukazujú miesta na koži, ktoré majú nedostatočné alebo žiadne dezinfekčné prostriedky na povrchu - čo potvrdzuje kvalitu vašej techniky dezinfekcie rúk.



schülke optics concentrate

Zloženie

Glycerin, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Zvláštne upozornenia

Konzentrát nepoužívajte neriedený, ale iba v kombinácii s dezinfekčnými prostriedkami na ruky na alkoholovej báze na tréningové účely podľa návodu. Konzentrát skladujte v tmavom prostredí. Aby bolo zaistené, že školiaci roztok nebude používaný na dezinfekciu rúk, musí školiteľ zaistiť správne označenie a likvidáciu. Pokiaľ dôjde k rozliatiu, môžu tam byť zvyšky fluorescence a alkoholu. Nenechávajú sa zaschnúť, ale ihneď vyčistite.

Životné prostredie

schülke vyrába produkty hospodárne a pomocou vyspelých, bezpečných a ekologických výrobných procesov pri súčasnom zachovaní našich vysokých štandardov kvality.



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10003



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Schülke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schulke.com
Distribútor

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com
Výrobca